

Deconflog gel

CE 1370
Dispositivo medico

Gel a base di **Acido ialuronico, Aloe Vera e
Olio di Jojoba** da agricoltura Biologica

FERITE, USTIONI E IRRITAZIONI

Tubo da 25 g e

DECONFLOG Gel è un dispositivo medico che agisce proteggendo la ferita che ha leso il derma creando un ambiente ottimale per i processi di riparazione e proteggendo, al contempo, l'area da agenti esterni di natura fisica (sfregamenti) e batterica.

DECONFLOG Gel esplica un'azione coadiuvante del processo di riparazione tissutale nel caso di:

- Irritazioni e arrossamento (anche da pannolino);
- Post interventi di peeling, depilazione e laser;
- Ombelico del neonato;
- Lesioni superficiali: screpolature, graffi, escoriazioni, abrasioni, ustioni lievi, tagli superficiali;
- Lesioni profonde: ferite chirurgiche, piaghe da decubito, ulcere.

MODALITÀ D'USO: Prima dell'uso lavare le mani. Dopo aver pulito e disinfettato l'area, applicare uno strato sottile di gel direttamente sulla zona da trattare. In caso di ferite superficiali massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. In caso di ferite profonde eseguire un leggerissimo massaggio e procedere applicando sulla parte lesa una garza o un bendaggio sterile. Richiudere il tubetto dopo l'uso. Applicare 2 volte al giorno, fino alla remissione del sintomo. Il trattamento non deve superare i 30 giorni. Nel caso in cui il sintomo persista, rivolgersi al proprio Medico o Farmacista. Rivolgersi a medico nel caso di ferite infette e purulente o di applicazione del dispositivo medico su un neonato.

COMPOSIZIONE: Aloe Vera, Sodio ialuronato, Acrylates/C10 - 30 alkyl Acrylate Crosspolymer, Olio Jojoba*, Polivinilpirrolidone (PVP), Sodio idrato perle, Benzil Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate, Aqua.

(*: da agricoltura biologica)

AVVERTENZE: Non utilizzare in caso di ipersensibilità verso uno o più componenti. Sebbene non siano noti fenomeni di sensibilizzazione, l'uso prolungato di prodotti topici potrebbe portare a fenomeni di sensibilizzazione. In caso occorresse interrompere il trattamento consultare il proprio medico o farmacista. Non usare in concomitanza con disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario, perché l'acido ialuronico può precipitare in loro presenza. In caso di trattamento topico concomitante di ferite con antibiotici o altri agenti locali rivolgersi al medico o al farmacista. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e ben conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Conservare ben chiuso, in luogo fresco ed asciutto al riparo da luce e calore e lontano dalla portata dei bambini. Una volta aperto il prodotto può essere utilizzato fino a 12 mesi. Il dispositivo medico scaduto o danneggiato deve essere smaltito in accordo alla legislazione vigente.

EFFETTI COLLATERALI: Non sono noti né previsti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto.

Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali.

In caso di comparsa di fastidi persistenti consultare il Medico curante o il farmacista.

Segnalare al fabbricante e all'autorità competente qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo.

CONFEZIONE: Tubo da 25 g e

Data ultima revisione: NOVEMBRE 2018

