

Decovagin®

lavanda vaginale

CE 0425
Dispositivo Medico

Coadiuvante nei processi di irritazione e infiammazione intima vaginale a base di **Sodio ialuronato, Aloe vera e Magaldrato**

Un ecosistema vaginale in equilibrio è condizione necessaria al benessere femminile e l'integrità della mucosa vaginale è fondamentale per la protezione di questo ambiente. Un epitelio vaginale sano, infatti, garantisce il nutrimento (glicogeno) e le condizioni ambientali (pH 3,5 - 4,5) per la crescita della microflora "amica" (microflora di "Doderlein"). Numerosi sono gli agenti patogeni, come microrganismi e sostanze tossiche, e comuni le condizioni (menopausa, trattamenti farmacologici, contraccettivi orali, indumenti stretti, alimentazione) che possono alterare i meccanismi di difesa ora descritti, e favorire così la comparsa di vaginiti e vaginosi. Risultato di fondamentale importanza quindi, garantire un ambiente vaginale sano e protetto.

CHE COSA È

Decovagin® lavanda vaginale è un dispositivo medico certificato CE, in grado di svolgere un'efficace azione filante sulla mucosa vaginale e creare un ambiente fisiologicamente attivo nella protezione contro agenti patogeni.

CONTENUTO DEI FLACONI

Decovagin® lavanda vaginale contiene Sodio ialuronato, Aloe vera e Magaldrato che, grazie alle loro virtù filmogene e protettive, favoriscono il processo della rigenerazione cellulare e aiutano a mi-

gliorare i caratteristici sintomi del disagio vaginale.

Nella formulazione è contenuto anche l'Acido lattico, normalmente presente nell'ambiente vaginale, per favorire un'immediata regolazione del pH, condizione indispensabile per la salute della microflora vaginale.

PERCHÉ SI USA

Decovagin® lavanda vaginale è utile nell'alleviare irritazione, bruciori, prurito e nel migliorare il pH e l'idratazione della mucosa vaginale. Aiuta a proteggere l'ecosistema vaginale e a prevenire i fastidiosi sintomi che compaiono in caso di vaginiti e vaginosi di varia natura. È anche consigliato alle donne in menopausa per ripristinare la fisiologia dell'ambiente vaginale e ridurre i sintomi della secchezza vaginale. Decovagin Lavanda Vaginale non sostituisce la terapia medica ma ne rappresenta un utile prodotto complementare.

ISTRUZIONI PER L'USO

La polvere contenuta nel tappo serbatoio e il liquido presente nel flacone vengono facilmente unite al momento dell'uso, grazie al pratico tappo serbatoio brevettato RewCap®.

Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare Decovagin Lavanda Vaginale.

Il dispositivo medico è monouso, e cia-

scuna lavanda va utilizzata per una singola irrigazione, dopo aver unito la polvere contenuta nel tappo serbatoio al liquido presente nel flacone come di seguito descritto:

Procedere con l'irrigazione inserendo delicatamente la cannula in vagina e premendo le pareti del flacone fino a completo svuotamento dello stesso.

Eeguire l'irrigazione subito dopo aver agitato il flacone per permettere alla polvere versata al suo interno di rimanere sospesa nel liquido: la presenza di particelle in sospensione è caratteristica del prodotto e non pregiudica la funzionalità e la conformità del prodotto.

FREQUENZA DI UTILIZZO

Si consiglia 1 applicazione al giorno, al mattino o alla sera prima di coricarsi.

AVVERTENZE PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Tenere il preparato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Il prodotto non è destinato all'uso pediatrico.

Il prodotto è per uso vaginale.

Non utilizzare per uso diverso da quello indicato.

Non ingerire.

Evitare il contatto con gli occhi.

Il dispositivo è monouso: usare immediatamente dopo l'apertura. Eventuali rimanenze di prodotto nel flacone aperto vanno gettate e non riutilizzate.

La cannula non è riutilizzabile: va gettata via dopo il primo utilizzo.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso qualsiasi componente del prodotto.

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

In caso di gravidanza certa o presunta, durante l'allattamento e in concomitanza di altre terapie farmacologiche locali, consultare il parere del medico prima dell'utilizzo del prodotto.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono noti ad oggi effetti indesiderati causati dall'uso del prodotto. Nel caso si verificano reazioni particolari sospendere, l'uso del prodotto e rivolgersi al proprio medico curante o al farmacista.

COMPOSIZIONE

Il flacone contiene: Acqua, Sodio ialuronato, Aloe Vera gel, Acido lattico, Polisorbato 20, Sodio benzoato, Potassio sorbato, Profumo.

Il tappo serbatoio contiene: Magaldrato, Magnesio stearato, Silice micronizzata.

EVENTUALE TOSSICITÀ DICHIARATA:

Non sono stati riportati casi di tossicità dichiarata.

MANUTENZIONE, SERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DISPOSITIVO

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione esterna e stampata sul flacone.

Non utilizzare in caso di confezione danneggiata.

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

MODALITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE

Il prodotto non utilizzato e i rifiuti da esso derivati devono essere smaltiti in conformità ai requisiti di legge locali.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

5 flaconi monouso da 100 ml con tappo serbatoio contenente 100,5 mg di polvere.

5 cannule monouso imbustate singolarmente.

Data ultima revisione: Giugno 2019

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Spingere la parte superiore del tappo fino a completo staccamento della capsula interna dal resto del tappo
2. Rimuovere il sigillo dalla capsula
3. Capovolgere la capsula in modo da versare la polvere contenuta nella stessa all'interno del flacone
4. Mantenendo la capsula sul flacone, agitare fino a completa solubilizzazione della polvere
5. Rimuovere la capsula
6. Inserire la cannula nel flacone
7. Inserire delicatamente la cannula in vagina e premere le pareti del flacone preferibilmente capovolto in modo da permettere il suo completo svuotamento.
8. Utilizzare il prodotto non appena ricostituito. La presenza di particelle indissolte non pregiudica la funzionalità e conformità del prodotto.

Le "Composizioni topiche comprendenti Magaldrato" sono coperte da Brevetto:

- Italian Patent n° 0001382236 (Settembre 2008)
- U.S.A. Patent n° US 2010/0092577 A1 (Aprile 2010)
- European Patent n° 2139451 (Giugno 2017)

La "Capsula perfezionata per sostanze da miscelare al momento dell'uso" (tappo con serbatoio Rew Cap®) è coperta da Brevetto:

- Italian Patent n° 1423797
- U.S.A. Patent n° 9.834.35
- European Patent n° 3142942

