

Espersol®

spray nasale

CE 0425
Dispositivo medico

Soluzione nasale ipertonica a base di **acqua di mare** e **acido ialuronico** da erogare all'interno delle narici per ristabilire una corretta respirazione in caso di episodi allergici, raffreddore, riniti e sinusiti.

L'ostruzione delle cavità nasali da parte di muco ed essudati è una fastidiosa conseguenza delle patologie naso-sinusal, così come la secchezza nasale spesso impedisce i fisiologici processi respiratori soprattutto in caso di episodi allergici dovuti ad agenti ambientali quali polline, polveri e fumo.

CHECOS'È Espersol® Spray

Espersol® Spray è un prodotto naturale a base di acqua di mare e acido ialuronico che, grazie alla funzionalità del beccuccio spray in grado di diffondere uniformemente il prodotto all'interno delle narici, protegge e riporta alle normali condizioni fisiologiche le mucose delle vie respiratorie superiori facilitando la rimozione dalle stesse di eventuali agenti ambientali irritanti quali polline e polvere.

Espersol® Spray è un dispositivo medico pronto all'uso che può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata. I suoi componenti, l'Acqua di mare e l'Acido ialuronico, lavorano in maniera sinergica liberando le narici dal muco in eccesso, e migliorando le mucose nasali grazie all'azione protettiva ed emolliente svolta principalmente dal Sodio ialuronato.

PERCHÉ SI USA Espersol® Spray

Espersol® Spray è indicato per rimuovere agenti irritanti quali polline, polvere e fumo, per fluidificare il muco, mantenere umide le cavità nasali e facilitare la respirazione in caso di episodi allergici, raffreddore, riniti e sinusite.

Non sostituisce la terapia medica ma ne rappresenta un utile prodotto complementare. Per un'azione più completa si consiglia di abbinare ad **Espersol® Spray** dei lavaggi da effettuarsi con **Espersol® Soluzione nebulizzante**.

Espersol® Spray non contiene conservanti. Rispetta lo strato di ozono e il suo sistema di erogazione consente l'utilizzo in ogni posizione.

ISTRUZIONI PER L'USO DI Espersol® Spray

- Togliere la capsula di protezione dalla parte superiore della bombola ed inserire l'apposito erogatore;
- tenere la testa girata su di un lato e mai all'indietro;
- inserire nella narice superiore l'erogatore anatomico con molta delicatezza e premere per qualche secondo sopra l'erogatore per la fuoriuscita del prodotto;
- girare la testa dall'altra parte e ripetere l'operazione nell'altra narice;
- dopo l'uso, pulire ed asciugare l'erogatore.

FREQUENZA E DURATA DI UTILIZZO

Per un corretto utilizzo si consiglia:

- Nei bambini 1-2 spruzzi 2-3 volte al giorno
 - Negli adulti 2-3 spruzzi fino a 4 volte al giorno
- La durata d'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi e se è necessario può essere utilizzato per periodi prolungati su consiglio del proprio medico.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Tenere il preparato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Per l'uso su bambini al di sotto dei 2 anni consultare il parere del medico.

Non utilizzare per uso diverso da quello indicato.

Non ingerire.

Il prodotto è destinato all'utilizzo esclusivo su mucosa integra.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso qualsiasi componente del prodotto.

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Dai test di biocompatibilità svolti, il prodotto risulta **non sensibilizzante**.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti ad oggi effetti indesiderati causati dall'uso del prodotto.

Nel caso si verificano reazioni particolari sospendere l'uso del prodotto e rivolgersi al proprio medico curante o al farmacista.

Non essendo noti effetti indesiderati nell'utilizzo dei singoli componenti non ci sono particolari controindicazioni durante la gravidanza o l'allattamento. In tali casi, per una maggiore sicurezza, si raccomanda di seguire comunque il consiglio del medico.

COMPOSIZIONE DI Espersol® Spray

Acqua, acqua di mare, sodio ialuronato, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico e potassio fosfato bibasico. Gas propellente: Aria.

EVENTUALE TOSSICITÀ DICHIARATA

Non sono stati riportati casi di tossicità dichiarata.

MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DISPOSITIVO

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione esterna e stampata sul flacone. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata.

Attenzione. Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.

Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO

Non disperdere il contenitore nell'ambiente

Il prodotto non utilizzato e i rifiuti da esso derivati devono essere smaltiti in conformità ai requisiti di legge locali.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione contiene: 1 flacone da 100 ml

Non contiene conservanti



Biodue S.p.A. - Via A. Lorenzetti, 3/A
Loc. Sambuca V.P. - Barberino Tavarnelle (FI) - Italia

BIODUE S.p.A. Azienda con sistema di gestione per la qualità norma **ISO13485** certificato da Bureau Veritas